

## COJINES SUAPEL SANITIZED



### Descripción

Cojines antiescaras de suapel sanitized rellenos de fibra siliconada conjugada. Dispone de cintas para fijar el cojín a la silla de ruedas u otros asientos. Con forma redonda con agujero, cuadrado, cuadrado con agujero, herradura cuadrada y herradura redonda.

### Efectos y ventajas

Gracias a su composición y forma se libera la zona de presión previniendo la aparición de úlceras por presión (UPP).

Recomendado para aquellas personas que permanecen periodos de tiempo largos sentados por movilidad reducida, vida sedentaria etc.

Asimismo, según la patología (postparto, hemorroides, fístulas, operaciones de próstata, etc.) se recomienda una forma u otra para liberar de presión la zona afectada.

### Tratamiento sanitized del tejido:

Antiácaros, antibacterias, antihongos, antichinches y antiolores.

Peso máximo de soporte: 80kg.

Grado de riesgo: bajo-medio.

### Instalación

El cojín se adapta a cualquier tipo de asiento, aún así se debe verificar primero. Se debe tener en cuenta que los cojines con forma de herradura, la parte abierta se posiciona en la zona del respaldo (ver ilustración).

### Composición

- Funda exterior:

Tejido de suapel (92% poliéster y 8% acrílico) con tratamiento sanitized. Acabado con resinas acrílicas y antibacterias sanitized.

Parte interior: tejido de terlenka (65% poliéster y 35% algodón).

- Relleno: Fibra hueca siliconada conjugada.

Dispone de cintas 100% poliéster para sujetar el cojín a la silla de ruedas u otros asientos y facilitar su posición.

### Dimensiones

- Redondo con agujero: 44x11cm.

- Resto de cojines: 44x44x11cm.

### Mantenimiento

Cepillar o sacudir periódicamente la cara de fibra para mantenerla en condiciones ópticas y ralentizar su deterioro. Lavar a mano con agua fría y productos no abrasivos.

En caso de lavar a máquina, utilizar un programa para prendas delicadas y suprimir el centrifugado. Se recomienda utilizar una funda o red especial para evitar una deformación excesiva durante el lavado.

Secar en posición horizontal.

No planchar.

No usar lejía.

No limpiar en seco.


### Garantía

El periodo de garantía de todos los cojines excepto los de Flotación Líquida y Silicona es de dos años a contar desde la fecha de compra del cojín. Los cojines de Flotación Líquida y Silicona tienen una garantía de 3 meses. Esta garantía no cubre el desgaste normal del producto y no sustituye a las garantías legales. Rogamos contactar con el departamento de calidad de la empresa en caso de incidencia para resolverla.


# Antiescaras

## Cojines suapel sanitized

### Modelos

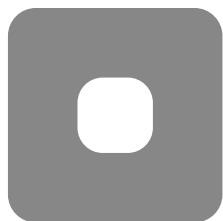

Cuadrado  
con agujero

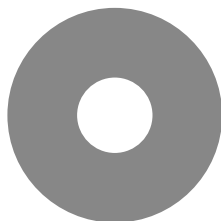

Redondo  
con agujero



Herradura  
cuadrada



Herradura  
redonda



Cuadrado

### Colores



Marino




Gris



Blanco

Forma correcta de  
colocar un cojín de  
herradura.

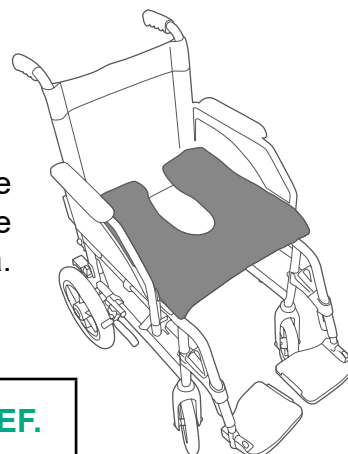

MODELO	DIMENSIONES (CM)	COLOR	VERSIÓN	REF.
Cojines suapel sanitized	44x11	Blanco	Redondo agujero	101100
	44x44x11	Blanco	Cuadrado agujero	101101
			Herradura redonda	101102
			Cuadrado	101103
			Herradura cuadrada	101104
			Gris	Cuadrado
	44x11	Marino	Cuadrado	101108
		44x44x11	Gris	Redondo agujero
	Marino		Redondo agujero	101201
	Gris		Herradura redonda	101202
	Marino		Herradura redonda	101203
	Gris		Herradura cuadrada	101204
	Marino		Herradura cuadrada	101205
	Gris		Redondo agujero	101210
Marino	Redondo agujero		101212	



antiol or



anti bacterias



anti hongos



anti ácaros



anti CHINCHES



SUAVE



TRANSPIRABLE



LAVABLE