

COJINES SUAPEL SANITIZED



Descripción

Cojines antiescaras de suapel sanitized rellenos de fibra siliconada conjugada. Dispone de cintas para fijar el cojín a la silla de ruedas u otros asientos. Con forma redonda con agujero, cuadrado, cuadrado con agujero, herradura cuadrada y herradura redonda.

Efectos y ventajas

Gracias a su composición y forma se libera la zona de presión previniendo la aparición de úlceras por presión (UPP).

Recomendado para aquellas personas que permanecen periodos de tiempo largos sentados por movilidad reducida, vida sedentaria etc.

Asimismo, según la patología (postparto, hemorroides, fístulas, operaciones de próstata, etc.) se recomienda una forma u otra para liberar de presión la zona afectada.

Tratamiento sanitized del tejido:

Antiácaros, antibacterias, antihongos, antichinches y antiolores.

Peso máximo de soporte: 80kg.

Grado de riesgo: bajo-medio.

Instalación

El cojín se adapta a cualquier tipo de asiento, aún así se debe verificar primero. Se debe tener en cuenta que los cojines con forma de herradura, la parte abierta se posiciona en la zona del respaldo (ver ilustración).

Composición

- Funda exterior:

Tejido de suapel (92% poliéster y 8% acrílico) con tratamiento sanitized. Acabado con resinas acrílicas y antibacterias sanitized.

Parte interior: tejido de terlenka (65% poliéster y 35% algodón).

- Relleno: Fibra hueca siliconada conjugada.

Dispone de cintas 100% poliéster para sujetar el cojín a la silla de ruedas u otros asientos y facilitar su posición.

Dimensiones

- Redondo con agujero: 44x11cm.

- Resto de cojines: 44x44x11cm.

Mantenimiento

Cepillar o sacudir periódicamente la cara de fibra para mantenerla en condiciones ópticas y ralentizar su deterioro. Lavar a mano con agua fría y productos no abrasivos.

En caso de lavar a máquina, utilizar un programa para prendas delicadas y suprimir el centrifugado. Se recomienda utilizar una funda o red especial para evitar una deformación excesiva durante el lavado.

Secar en posición horizontal.

No planchar.

No usar lejía.

No limpiar en seco.


Garantía

El periodo de garantía de todos los cojines excepto los de Flotación Líquida y Silicona es de dos años a contar desde la fecha de compra del cojín. Los cojines de Flotación Líquida y Silicona tienen una garantía de 3 meses. Esta garantía no cubre el desgaste normal del producto y no sustituye a las garantías legales. Rogamos contactar con el departamento de calidad de la empresa en caso de incidencia para resolverla.


Antiescaras

Cojines suapel sanitized

Modelos

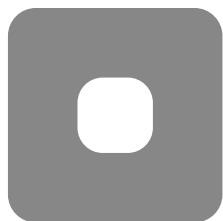

Cuadrado
con agujero

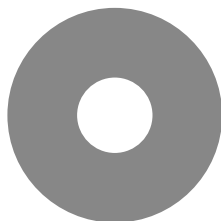

Redondo
con agujero



Herradura
cuadrada



Herradura
redonda



Cuadrado

Colores



Marino




Gris



Blanco

Forma correcta de
colocar un cojín de
herradura.

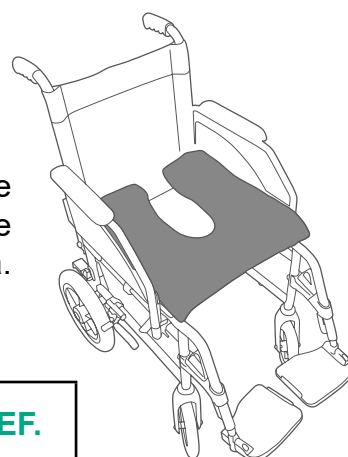

| MODELO | DIMENSIONES (CM) | COLOR | VERSIÓN | REF. |
|--------------------------|------------------|----------|--------------------|-----------------|
| Cojines suapel sanitized | 44x11 | Blanco | Redondo agujero | 101100 |
| | 44x44x11 | Blanco | Cuadrado agujero | 101101 |
| | | | Herradura redonda | 101102 |
| | | | Cuadrado | 101103 |
| | | | Herradura cuadrada | 101104 |
| | | | Gris | Cuadrado |
| | 44x11 | Marino | Cuadrado | 101108 |
| | | 44x44x11 | Gris | Redondo agujero |
| | Marino | | Redondo agujero | 101201 |
| | Gris | | Herradura redonda | 101202 |
| | Marino | | Herradura redonda | 101203 |
| | Gris | | Herradura cuadrada | 101204 |
| | Marino | | Herradura cuadrada | 101205 |
| | Gris | | Redondo agujero | 101210 |
| Marino | Redondo agujero | | 101212 | |



antiol or



anti bacterias



anti hongos



anti ácaros



anti CHINCHES



SUAVE



TRANSPIRABLE



LAVABLE