

COJÍN ERGOGEL COMPLEX



Descripción

Cojines antiescaras de gel de silicona y viscoelástica Ergogel Complex.

Efectos y ventajas

Según la escala de Norton, estos cojines son recomendables para los pacientes con alto/ muy alto riesgo de escaras. Gracias al material viscoelástico y de silicona que libera la presión en el sacro, distribuye y ajusta la presión en la zona del coxis y la parte posterior de los glúteos. Este modelo de cojín tiene forma anatómica para facilitar el posicionamiento de las piernas. Es esencial examinar el desgaste normal del cojín (agujeros, modificaciones en la superficie, etc.) rutinariamente.

Indicado para uso en asientos convencionales (sillas, sillones, etc.), sillas de ruedas (con o sin inodoro incorporado) u otros medios de transporte para personas con movilidad reducida.

Propiedades de la silicona: aporta mayor satisfacción de frescor además de repartir las presiones de forma uniforme por toda la base del cojín.

Peso máximo: 120kg.

Densidad: 90kg/m³.

Grado de riesgo: Alto.

Instalación

El cojín se adapta a cualquier tipo de asiento. Utilizar sobre superficie plana. Se debe tener en cuenta que la plataforma anatómica es para posicionar piernas de forma correcta. Los cojines de herradura, la parte abierta se posiciona en la zona del respaldo (ver ilustración). Se debe

verificar que el cojín se adapte al asiento donde vaya a ser utilizado.

Composición

- Funda exterior: Tejido formado por dos capas. Revestimiento 100% poliuretano.
- Parte interior: Tejido 100% poliéster. Grosor del tejido 230g/m².
- Núcleo: Viscoelástica inyectada y base de silicona. Doble densidad de silicona en el coxis, zona de mayor riesgo.

Dimensiones

42x42x8cm.

Mantenimiento

Lavable a mano o a máquina con detergente neutro a 95°C y suprimiendo el centrifugado.

No usar lejía o productos abrasivos.

Tolera secadora a temperatura reducida.

No planchar.




**IMPORTANTE:
NO MOJAR LA VISCOELÁSTICA.**

Garantía

El periodo de garantía de todos los cojines excepto los de Flotación Líquida y Silicona es de dos años a contar desde la fecha de compra del cojín. Los cojines de Flotación Líquida y Silicona tienen una garantía de 3 meses. Esta garantía no cubre el desgaste normal del producto y no sustituye a las garantías legales. Rogamos contactar con el departamento de calidad de la empresa en caso de incidencia para resolverla.

Antiescaras

Cojín Ergogel Complex Modelos

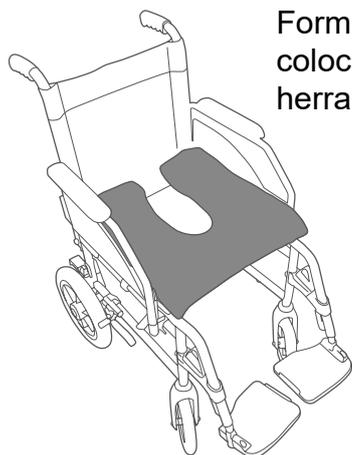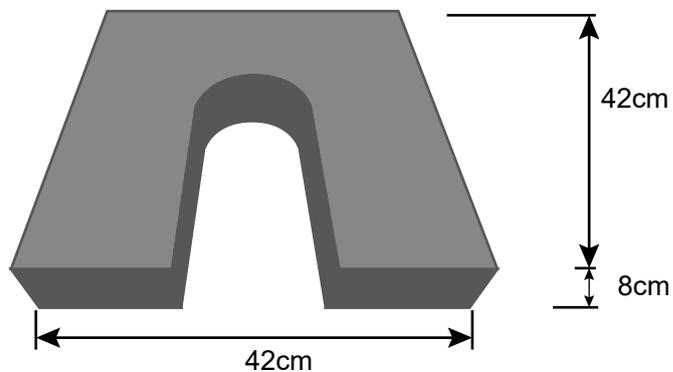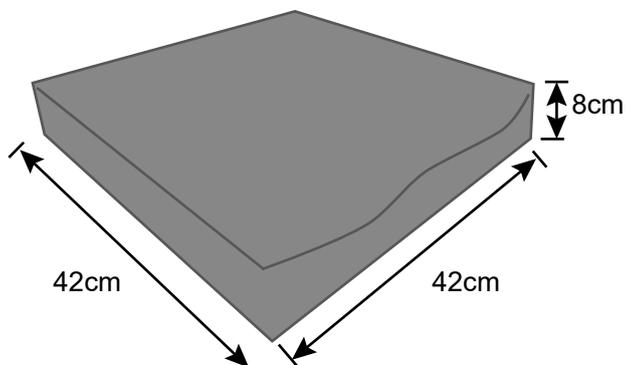

Forma correcta de colocar un cojín de herradura.



La base del cojín Ergogel Complex es antideslizante.

Colores



Grafito

DIMENSIONES (CM)	MODELO	REF.
42x42x8	Ergogel Complex	102428
	Ergogel Complex herradura	102430

