

## SÁBANAS ANTIESCARAS SUAPEL SANITIZED



### Descripción

Sábanas antiescaras de suapel sanitized. El exterior de fibra de poliéster otorga una sensación de confort, estando indicado para pacientes que necesitan una sensación de calor y confort extra, gracias a su tejido en forma de vellones de lana. Su uso está indicado tanto en silla de ruedas como en sillones o camas.

### Consejos

La primera prevención de la escara en posición sentada o tumbada, consiste en cambiar los puntos de apoyo del cuerpo sobre la zona donde éste reposa. Por término medio esto debe realizarse cada tres horas, a fin de reducir una presión demasiado prolongada en las áreas de prominencias óseas y permitir el acceso de la sangre a los tejidos. Se debe comprobar que la sábana se adapta al asiento o cama donde va a ser utilizada.

### Instalación y precauciones

La forma de las sábanas de suapel está pensada para adaptarse a las diferentes tipos de asientos y camas que puedan usar los pacientes y necesidades de los mismos. Están prohibidos los productos cáusticos, decapantes, disolventes y objetos punzantes/cortantes en contacto directo con el producto. Evitar el contacto prolongado de líquidos y humedades con la sábana de suapel. Examinar regularmente el desgaste normal de la sábana

(modificación del aspecto de la superficie, etc.).

### Composición

Exterior: poliéster, terlenka.

### Dimensiones

Según referencia.

### Tratamiento del material y conservación

El tratamiento de la funda sanitized se aplica sobre la superficie del tejido para crear una barrera anti-ácaros, antibacterias y anti-hongos muy eficaz. Un plus de protección para los complementos de descanso. Las sábanas de suapel deben ser almacenadas preferentemente en posición plana y protegidas de la luz natural y de la humedad.

### Eliminación

No quemar ni tirar en la naturaleza o fuera de lugares destinados para ello.

### Garantía

El periodo de garantía es de dos años a contar desde la fecha de compra del cojín. Esta garantía no cubre el desgaste normal del producto y no sustituye a las garantías legales. Rogamos contactar con el departamento de calidad de la empresa en caso de incidencia para resolverla.

Duración de vida del producto: 1 año.

# Antiescaras

## Sábanas antiescaras suapel sanitized Modelos



MODELO	DIMENSIONES (CM)	REF.
Sábana de suapel sanitized	40x60	105100
	50x70	105101
	60x80	105102
	70x80	105103
	60x90	105104
	70x90	105105
	80x90	105106
	90x150	105107
	110x170	105108
	70x190	105109
	80x190	105110
	90x190	105111
	105x190	105113
	120x190	105114
	135x190	105115
	90x160	105117
	Sábana de suapel sanitized ajustable	90x190x20

### Colores



antiol or



anti bacterias



anti hongos



anti ácaros



anti CHINCHES



SUAVE



TRANSPIRABLE



LAVABLE