

## CINTURÓN PERINEAL CON TIRANTES



### Descripción

Cinturón perineal con tirantes.

### Efectos y ventajas

El cinturón perineal con tirantes para silla o sillón ofrece soluciones a problemas de inestabilidad causados por disminuciones funcionales físicas o psicológicas. Evita que el paciente se incline, se deslice o sufra mala postura. Ofrece una sujeción firme y cómoda en el área perineal con cierre de seguridad en la parte posterior para evitar que el paciente lo abra por sí mismo.

### Indicaciones para el uso

Para colocar correctamente este artículo, el paciente debe colocarse cómodamente en la silla/sillón y el cinturón debe pasar a través del área perineal apretando las correas de sujeción para ajustarse al contorno de la cintura del paciente, asegurándose de que no hay holgura y de manera firme.

### Composición

Tejido acolchado (antelina, velur, foam). Cierre

de hebillas y cintas de polipropileno.

### Dimensiones

A consultar

### Mantenimiento

Lavar a mano o a máquina a temperatura máxima de 40°C.

Secar en posición horizontal y sin fuentes de calor.


### Garantía

El periodo de garantía es de dos años a contar desde la fecha de compra. Esta garantía no cubre el desgaste normal del producto y no sustituye a las garantías legales. Rogamos contactar con el departamento de calidad de la empresa en caso de incidencia para resolverla.

# Sujeciones

## Cinturón con tirantes

### Modelos

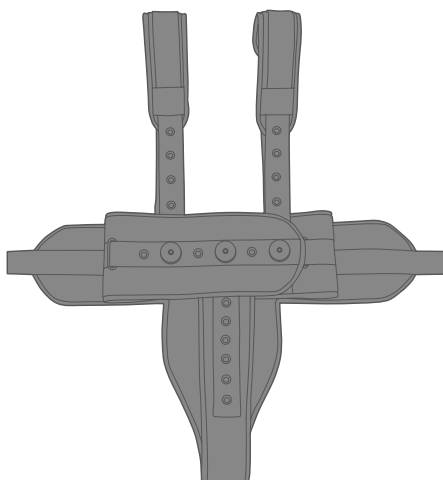

### Colores



Acolchado  
Marino



Transpirable  
Negro

MODELO	TEJIDO	CIERRE	REF.	DIMENSIONES (CM)
Silla	Acolchado	Hebillas	305010	A consultar
		Imán	304303	
		Ironclip	304313	
	Transpirable	Hebillas	305554	
Sillón	Acolchado	Hebillas	305604	
		Imán	304353	
		Ironclip	304355	
	Transpirable	Hebillas	305654	

