

CINTURONES PERINEALES



Descripción

Cinturones perineales para silla /sillón.

Efectos y ventajas

El cinturón perineal para silla o sillón ofrece soluciones a problemas de inestabilidad causados por disminuciones funcionales físicas o psicológicas. Evita que el paciente se incline, se deslice o sufra mala postura. Ofrece una sujeción firme y cómoda en el área perineal con cierre de seguridad en la parte posterior para evitar que el paciente lo abra por sí mismo.

Indicaciones para el uso

Para colocar correctamente este artículo, el paciente debe colocarse cómodamente en la silla/sillón y el cinturón debe pasar a través del área perineal apretando las correas de sujeción para ajustarse al contorno de la cintura del paciente, asegurándose de que no hay holgura y de manera firme.

Composición

- Acollado: 20% anteline (100% poliéster), 20% velur (100% poliamida) y 60% de espuma.
- Transpirable: 100% poliéster.
- Correas: 100% poliuretano.

Dimensiones

A consultar

Mantenimiento

Lavar periódicamente a mano o a máquina a una temperatura máxima de 40°C.
Secar en horizontal y sin fuentes de calor.


Garantía

El periodo de garantía es de dos años a contar desde la fecha de compra. Esta garantía no cubre el desgaste normal del producto y no sustituye a las garantías legales. Rogamos contactar con el departamento de calidad de la empresa en caso de incidencia para resolverla.

Sujeciones

Cinturones perineales

Modelos

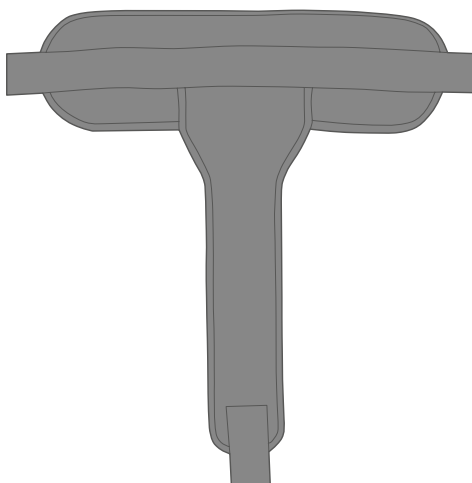

Colores



Acolchado
Marino



Transpirable
Negro

MODELO	TEJIDO	CIERRE	REF.	DIMENSIONES (CM)
Silla	Acolchado	Hebillas	305501	A consultar
		Imán	304302	
		Ironclip	304312	
	Transpirable	Hebillas	305553	
Sillón	Acolchado	Hebillas	305603	
		Imán	304352	
		Ironclip	304362	
	Transpirable	Hebillas	305653	

