

## SLING COBEX



### Descripción

Sling cobex. Inmovilizador de hombro.

### Efectos y ventajas

Contiene y estabiliza la articulación escapulohumeral.

### Composición

Tejido foamizado 100% poliéster.  
Cierre de velcro.

### Dimensiones

Talla única.

### Mantenimiento

Lavar a mano o a máquina con productos no abrasivos.

Temperatura máxima de 40°C.

No lavar en seco.

No usar lejía.

No planchar.

No se puede secar en secadora.

### Garantía

El periodo de garantía es de dos años a contar desde la fecha de compra del cojín. Esta garantía no cubre el desgaste normal del producto y no sustituye a las garantías legales. Rogamos contactar con el departamento de



calidad de la empresa en caso de incidencia para resolverla.

### Colores



Beige

# Sujeciones

## Sling cobex Modelos

### Colocación

**1** Colocar el antebrazo doblando en suspensión, manteniendo un ángulo de 90° con respecto al otro brazo, que permanecerá pegado al cuerpo del paciente. El dedo pulgar debe estar apuntando hacia arriba.

**2** Situar el soporte (pieza A) en el antebrazo, cubriendo y envolviendo de tal forma que quede ajustado al codo en la esquina cerrada de la pieza.

**3** Una vez colocada la pieza principal, utiliza la pieza B para fijarla en el antebrazo, situándola (B) en la parte del antebrazo más cercana al codo y pegando los velcros en ambas caras de la pieza A.

**4** Utiliza la pieza C para cerrar el soporte a la altura de la muñeca, situando uno de los pasadores en la parte interior en contacto con el cuerpo y la cara lisa en la parte externa de la pieza.

**5** Pasa la cinta de la pieza A desde el codo, rodeando el cuello por encima del hombro contrario al brazo inmovilizado, sujetándola a continuación con el pasador de la pieza C. Fija la cinta sobre sí misma con el velcro que lleva en su extremo.

**6** Finalmente sitúa la pieza D enganchada en la hebilla interior de la pieza C, fijándola sobre sí misma con el velcro. Rodee a continuación la cintura del usuario y fija el otro extremo en la pieza A a la altura del codo.



| MODELOS              | TALLA | COLOR       | REF.   |
|----------------------|-------|-------------|--------|
| Sling Cobex          | Única | Beige       | 501200 |
| Sling Cobex Infantil |       |             | 501201 |
| Europa               |       | Beige+negro | 501100 |

