

COUSSIN SUAPEL SANITIZED



Description

Coussins anti-escarres assainis suapel remplis de fibre de silicone conjuguée. Avec des sangles pour fixer le coussin au fauteuil roulant ou à d'autres sièges. Disponible en rond avec trou, carré, carré avec trou, fer à cheval carré et fer à cheval rond.

Effets et avantages

Grâce à sa composition et à sa forme, la zone de pression est soulagée et les escarres (PU) sont évitées.

Recommandé pour les personnes qui passent de longues périodes en position assise en raison d'une mobilité réduite, d'un mode de vie sédentaire, etc. De même, en fonction de la pathologie (post-partum, hémorroïdes, fistules, opérations de la prostate, etc.), une forme ou une autre est recommandée pour soulager la pression sur la zone concernée.

Traitement aseptisé du tissu :

Anti-acarien, anti-bactérien, anti-fongique, anti-bugs et anti-odeur.

Poids maximal du support : 80 kg.

Niveau de risque : faible-moyen.

Installation

Le coussin s'adapte à tout type de siège, mais il faut d'abord le vérifier. Veuillez noter que pour les coussins en forme de fer à cheval, la partie ouverte est positionnée dans la zone du dossier (voir illustration).

Composition

- Couverture extérieure :

Tissu Suapel (92% polyester et 8% acrylique) avec traitement aseptisé. Finition avec des résines acryliques et assainissement antibactérien.

Partie intérieure : tissu terlenka (65% polyester et 35% coton).

- Remplissage : Fibre creuse siliconée conjuguée. Il dispose de sangles 100% polyester pour fixer le coussin au fauteuil roulant ou à d'autres sièges et faciliter son positionnement.

Dimensions

- Rond avec trou : 44x11cm.

- Autres coussins : 44x44x11cm.

Maintenance

Brossez ou secouez périodiquement le côté fibre pour le maintenir en bon état optique et ralentir sa détérioration. Laver à la main avec de l'eau froide et des produits non abrasifs.

En cas de lavage en machine, utilisez un programme pour vêtements délicats et n'essorez pas.

Il est recommandé d'utiliser une housse ou un filet spécial pour éviter toute déformation excessive pendant le lavage.

Sécher à plat.

Ne pas repasser.

Ne pas blanchir.

Ne pas nettoyer à sec.

Garantie

La période de garantie pour tous les coussins, à l'exception des coussins de flottaison liquide et de silicone, est de deux ans à compter de la date d'achat du coussin. Les coussins de flottaison liquide et de silicone sont garantis pendant 3 mois. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale du produit et ne remplace pas les garanties légales. En cas d'incident, veuillez contacter le service qualité de l'entreprise afin de le résoudre.


Anti-escarres

Coussin suapel sanitized

Modèles



Cuadrado con agujero

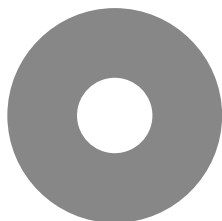

Redondo con agujero



Herradura cuadrada



Herradura redonda



Cuadrado

Couleurs



Bleu




Gris



Blanc

La façon correcte de placer un coussin en fer à cheval.

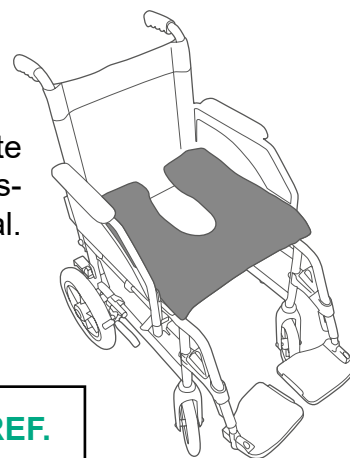

| MODELO | DIMENSIONES (CM) | COLOR | VERSIÓN | REF. |
|--------------------------|------------------|----------|--------------------|-----------------|
| Cojines suapel sanitized | 44x11 | Blanco | Redondo agujero | 101100 |
| | 44x44x11 | Blanco | Cuadrado agujero | 101101 |
| | | | Herradura redonda | 101102 |
| | | | Cuadrado | 101103 |
| | | | Herradura cuadrada | 101104 |
| | | | Gris | Cuadrado |
| | 44x11 | Marino | Cuadrado | 101108 |
| | | 44x44x11 | Gris | Redondo agujero |
| | Marino | | Redondo agujero | 101201 |
| | Gris | | Herradura redonda | 101202 |
| | Marino | | Herradura redonda | 101203 |
| | Gris | | Herradura cuadrada | 101204 |
| | Marino | | Herradura cuadrada | 101205 |
| | Gris | | Redondo agujero | 101210 |
| | Marino | | Redondo agujero | 101212 |



antiol or



anti bacterias



anti hon gos



anti ácar os



anti CHINCHES



SUAVE



TRANSPIRABLE



LAVABLE