

## COUSSIN SUAPEL SANITIZED



### Description

Coussins anti-escarres assainis suapel remplis de fibre de silicone conjuguée. Avec des sangles pour fixer le coussin au fauteuil roulant ou à d'autres sièges. Disponible en rond avec trou, carré, carré avec trou, fer à cheval carré et fer à cheval rond.

### Effets et avantages

Grâce à sa composition et à sa forme, la zone de pression est soulagée et les escarres (PU) sont évitées.

Recommandé pour les personnes qui passent de longues périodes en position assise en raison d'une mobilité réduite, d'un mode de vie sédentaire, etc. De même, en fonction de la pathologie (post-partum, hémorroïdes, fistules, opérations de la prostate, etc.), une forme ou une autre est recommandée pour soulager la pression sur la zone concernée.

Traitement aseptisé du tissu :

Anti-acarien, anti-bactérien, anti-fongique, anti-bugs et anti-odeur.

Poids maximal du support : 80 kg.

Niveau de risque : faible-moyen.

### Installation

Le coussin s'adapte à tout type de siège, mais il faut d'abord le vérifier. Veuillez noter que pour les coussins en forme de fer à cheval, la partie ouverte est positionnée dans la zone du dossier (voir illustration).

### Composition

- Couverture extérieure :

Tissu Suapel (92% polyester et 8% acrylique) avec traitement aseptisé. Finition avec des résines acryliques et assainissement antibactérien.

Partie intérieure : tissu terlenka (65% polyester et 35% coton).

- Remplissage : Fibre creuse siliconée conjuguée. Il dispose de sangles 100% polyester pour fixer le coussin au fauteuil roulant ou à d'autres sièges et faciliter son positionnement.

### Dimensions

- Rond avec trou : 44x11cm.

- Autres coussins : 44x44x11cm.

### Maintenance

Brossez ou secouez périodiquement le côté fibre pour le maintenir en bon état optique et ralentir sa détérioration. Laver à la main avec de l'eau froide et des produits non abrasifs.

En cas de lavage en machine, utilisez un programme pour vêtements délicats et n'essorez pas.

Il est recommandé d'utiliser une housse ou un filet spécial pour éviter toute déformation excessive pendant le lavage.

Sécher à plat.

Ne pas repasser.

Ne pas blanchir.


Ne pas nettoyer à sec.

### Garantie


La période de garantie pour tous les coussins, à l'exception des coussins de flottaison liquide et de silicone, est de deux ans à compter de la date d'achat du coussin. Les coussins de flottaison liquide et de silicone sont garantis pendant 3 mois. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale du produit et ne remplace pas les garanties légales. En cas d'incident, veuillez contacter le service qualité de l'entreprise afin de le résoudre.

# Anti-escarres


## Coussin suapel sanitized Modèles

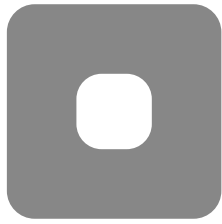

Cuadrado  
con agujero

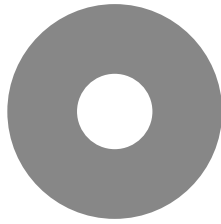


Redondo  
con agujero

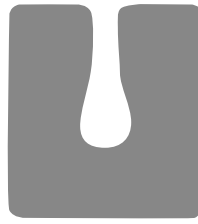

Herradura  
cuadrada



Herradura  
redonda

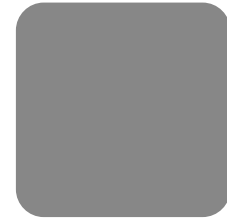

Cuadrado

## Couleurs



Bleu




Gris



Blanc

La façon correcte  
de placer un coussin  
en fer à cheval.

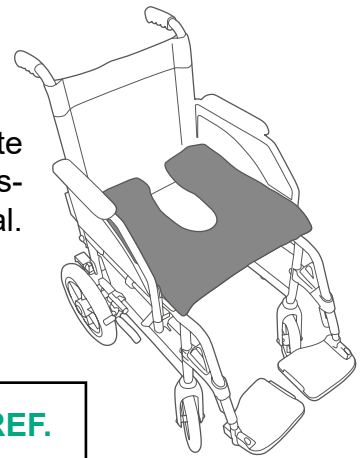

MODELO	DIMENSIONES (CM)	COLOR	VERSIÓN	REF.
Cojines suapel sanitized	44x11	Blanco	Redondo agujero	101100
	44x44x11	Blanco	Cuadrado agujero	101101
			Herradura redonda	101102
			Cuadrado	101103
			Herradura cuadrada	101104
			Gris	Cuadrado
	44x11	Marino	Cuadrado	101108
		44x44x11	Gris	Redondo agujero
	44x44x11		Marino	Redondo agujero
		Gris	Herradura redonda	101202
		Marino	Herradura redonda	101203
		Gris	Herradura cuadrada	101204
		Marino	Herradura cuadrada	101205
		Gris	Redondo agujero	101210
		Marino	Redondo agujero	101212



antiol or



anti bacterias



anti hon gos



anti ácar os



anti CHINCHES



SUAVE



TRANSPIRABLE



LAVABLE