

## COUSSIN ERGOGEL COMPLEX



### Description

Gel de silicone viscoélastique Ergogel Complex et oreillers viscoélastiques.

### Effets et avantages

Selon l'échelle Norton, ces coussins sont recommandés pour les patients présentant un risque élevé/très élevé d'escarres. Grâce à la matière viscoélastique et au silicone qui soulagent la pression sur le sacrum, il répartit et ajuste la pression dans la zone du coccyx et à l'arrière des fesses. Ce modèle de coussin est de forme anatomique pour faciliter le positionnement des jambes.

Il est essentiel d'examiner régulièrement le coussin pour détecter toute usure normale (trous, modifications de surface, etc.).

Convient aux sièges classiques (chaises, fauteuils, etc.), aux fauteuils roulants (avec ou sans toilettes intégrées) ou à d'autres moyens de transport pour les personnes à mobilité réduite.

Propriétés de la silicone : procure une plus grande satisfaction en matière de fraîcheur et répartit uniformément la pression sur la base du coussin.

Poids maximal : 120 kg.

Densité : 90 kg/m<sup>3</sup>.

Niveau de risque : élevé.

### Installation

Le coussin s'adapte à tout type de siège. Utilisez sur une surface plane. Il faut tenir compte du fait que la plate-forme anatomique sert à positionner correctement les jambes. Pour les coussins en fer à cheval, la partie ouverte est positionnée dans la zone du dossier (voir illustration). Il devrait être

vérifié que le coussin s'adapte au siège où il doit être utilisé.

### Composition

- Revêtement extérieur : tissu à deux couches. Doublure 100% polyuréthane.
- Partie intérieure : tissu 100% polyester. Épaisseur du tissu 230g/m<sup>2</sup>.
- Noyau : Base viscoélastique et silicone injectée. Double densité de silicone dans le coccyx, la zone la plus à risque.

### Dimensions

42x42x8cm.

### Maintenance

Lavable à la main ou en machine avec un détergent neutre à 95°C et en éliminant le cycle d'essorage.

N'utilisez pas d'eau de Javel ni de produits abrasifs.

Séchage par culbutage à basse température.

Ne pas repasser.

### IMPORTANT :




**NE PAS MOILLER LE VISCOÉLASTIQUE.**

### Garantie

La période de garantie pour tous les coussins, à l'exception de la flottaison liquide et du silicone, est de deux ans à compter de la date d'achat du coussin. Les coussins de flottaison liquide et de silicone sont garantis pendant 3 mois. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale du produit et ne remplace pas les garanties légales. En cas d'incident, veuillez contacter le service qualité de l'entreprise afin de le résoudre.

# Anti-escarres

## Coussin Ergogel Complex Modèles

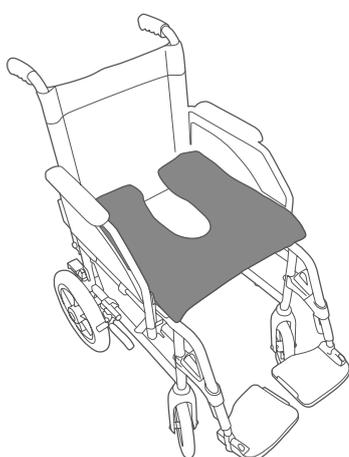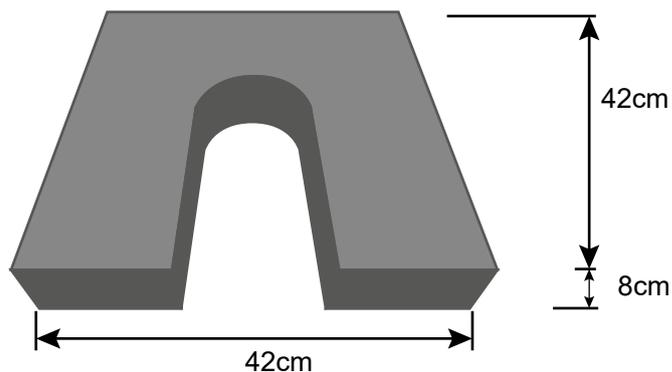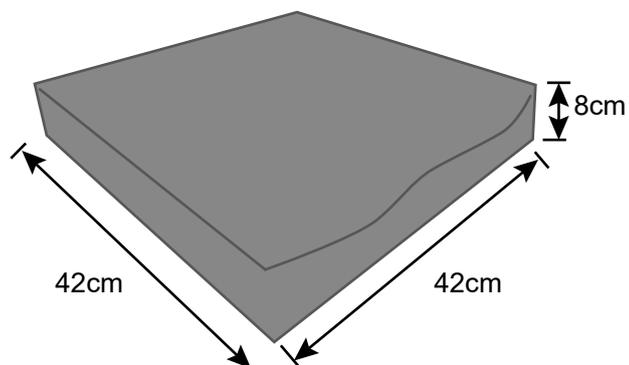

La façon correcte de placer un coussin en fer à cheval.



La base du coussin du Complexe Ergogel est antidérapant.

## Couleurs



Graphite

DIMENSIONES (CM)	MODELO	REF.
42x42x8	Ergogel Complex	102428
	Ergogel Complex herradura	102430

