

## COUSSINS SANILUXE



### Description

Coussins anti-escarres imperméables Saniluxe, remplis de fibre de silicone conjuguée. Avec des sangles pour attacher le coussin aux fauteuils roulants ou autres sièges.

### Effets et avantages

Grâce à sa composition et à sa forme, la zone de pression est soulagée et les escarres (PU) sont évitées.

Recommandé pour les personnes qui passent de longues périodes en position assise en raison d'une mobilité réduite, d'un mode de vie sédentaire, etc. De même, en fonction de la pathologie (post-partum, hémorroïdes, fistules, opérations de la prostate, etc.), une forme ou une autre est recommandée pour soulager la pression sur la zone concernée.

Propriétés du tissu en polyuréthane :

Anti-acarien, antibactérien, antifongique, anti-odeur, anti-tache, respirant, ignifuge, imperméable, doux et lavable.

Poids maximal du support : 80 kg.

Niveau de risque : faible-moyen.

### Installation

Le coussin s'adapte à tout type de siège, mais il faut d'abord le vérifier. Veuillez noter que pour les coussins en forme de fer à cheval, la partie ouverte est positionnée dans la zone du dossier (voir illustration).

### Composition

- Couverture extérieure :

Tissu composé de deux couches :

Doublure 100% polyuréthane.

Partie intérieure : tissu 100% polyester.

Épaisseur du tissu : 230g/m<sup>2</sup>.

- Remplissage : Fibre creuse siliconée conjuguée.

Il dispose de sangles 100% polyester pour fixer le coussin au fauteuil roulant ou à d'autres sièges et faciliter son positionnement.

### Dimensions

- Rond avec trou : 44x11cm.

- Autres coussins : 44x44x11cm.

### Maintenance

Laver à la main avec de l'eau froide et des produits non abrasifs. En cas de lavage en machine, utilisez un programme pour vêtements délicats et n'essorez pas. Il est recommandé d'utiliser une housse ou un filet spécial pour éviter toute déformation pendant le lavage.

Sécher en position horizontale.

Ne pas repasser.

Ne pas blanchir.

Ne pas nettoyer à sec.


### Garantie

La période de garantie pour tous les coussins, à l'exception de la flottaison liquide et du silicone, est de deux ans à compter de la date d'achat du coussin. Les coussins de flottaison liquide et de silicone sont garantis pendant 3 mois. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale du produit et ne remplace pas les garanties légales. En cas d'incident, veuillez contacter le service qualité de l'entreprise afin de le résoudre.


# Anti-escarres

## Coussins saniluxe


### Modèles

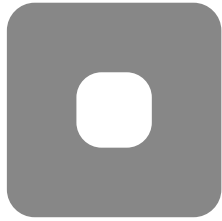

Cuadrado con agujero

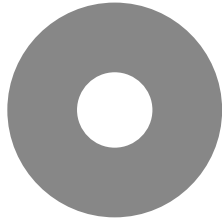

Redondo con agujero

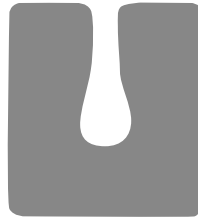

Herradura cuadrada



Herradura redonda



Cuadrado

### Couleurs



Graphite




Bleu



Blanc

La façon correcte de placer un coussin en fer à cheval.

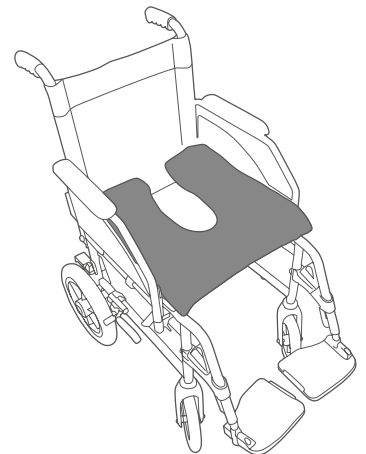

MODELO	DIMENSIONES (CM)	COLOR	VERSIÓN	REF.
Cojines saniluxe	44x11	Grafito	Redondo agujero	114100
	44x44x11	Grafito	Herradura redonda	114105
			Herradura cuadrada	114110
			Cuadrado agujero	114115
			Cuadrado	114120
		Blanco	Cuadrado	114122
		Celeste	Cuadrado	114124
		Blanco	Cuadrado agujero	114126
			Cuadrado agujero	114128
		Celeste	Herradura cuadrada	114130
			Herradura cuadrada	114132
	Blanco	Herradura redonda	114134	
		Herradura redonda	114136	
	44x11	Celeste	Redondo agujero	114138
		Blanco	Redondo agujero	114140



ANTIÁCAROS



ANTI HONGOS



SANTIBACTERIAS



ANTIOLOR



ANTIMANCHAS



TRANSPIRABLE



IGNÍFUGO



IMPERMEABLE



SUAVE



LAVABLE



ANTIDESLIZANTE