

BANDE DE SOUTIEN POUR LA CHEVILLE



Description

Bande de maintien de la cheville pour chaise ou fauteuil.

Effets et avantages

Offre des solutions aux problèmes d'instabilité causés par des déficiences fonctionnelles physiques ou psychologiques. Fixation détendue d'un ou des deux pieds, empêchant le patient de les bouger. Offre un maintien ferme et confortable au niveau de la cheville, avec une fermeture de sécurité à l'arrière pour empêcher le patient de l'ouvrir lui-même.

Mode d'emploi

Pour positionner correctement l'article, le patient doit être confortablement installé dans la chaise ou le fauteuil et la bande de soutien doit être passée derrière les mollets, en serrant les sangles de soutien pour épouser les contours des chevilles du patient, en veillant à ce qu'il n'y ait pas de jeu et à ce qu'elle s'ajuste fermement.

Composition

- Rembourrage: 20% antéline (100% polyester), 20% velours (100% polyamide) et 60 % mousse.
Sangles : 100% polypropylène.

Dimensions

Universel.

Entretien

Il suffit de le laver périodiquement à la main ou en machine à une température maximale de 40°C.


Sécher en position horizontale sans l'exposer à des sources de chaleur directe.

Garantie

La période de garantie est de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale du produit et ne remplace pas les garanties légales. En cas d'incident, veuillez contacter le service qualité de l'entreprise afin de le résoudre.

Bande de soutien pour la cheville

Modèles

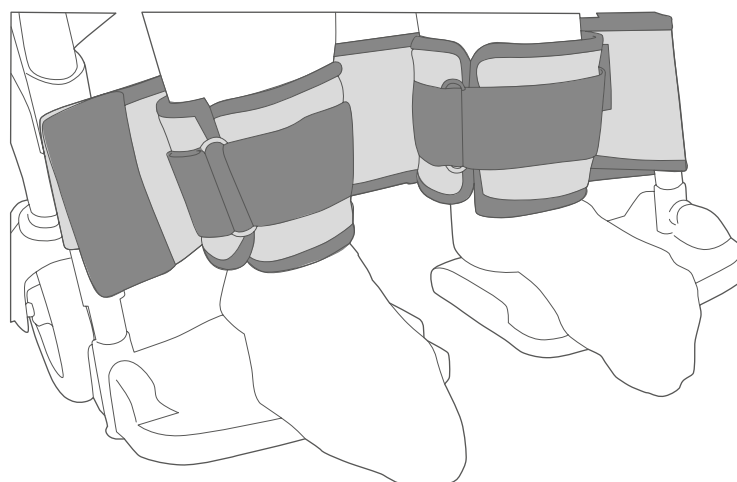

Couleurs



Marine

| MODELO | TEJIDO | CIERRE | REF. |
|--------------------------------|-----------|----------|--------|
| Banda de sujeción para tobillo | Acolchado | Hebillas | 307200 |

